



## BARRIER® Operationsmunskydd

### Komfortabelt skydd med BARRIER operationsmunskydd

Huvudsyftet med operationsmunskydd är att förhindra bakterieinfektioner hos både patienter och personal. Komforten är en annan kvalitetsaspekt när det gäller munskydd. Huden runt munnen, näsan och öronen är kroppens känsligaste del. Våra operationsmunskydd är tillverkade i ett mjukt material som ger hög komfort,





god andningsförmåga och inte irriterar bäraren.

### Valet av operationsmunskydd gör skillnad.<sup>13</sup>

BARRIER operationsmunskydd är utformat för att minimera överföringen av bakterier och partiklar från operationspersonalen till patienten. Ditt val av operationsmunskydd kan göra

skillnad. Våra BARRIER® munskydd filtrerar bort bakterier, vilket minskar såväl risken för infektion som behovet av dyr efterbehandling.<sup>13</sup>

- Munskyddens goda andningsförmåga gör det lätt att andas och gör dem bekvämare att använda under långa perioder
- Högeffektiv bakteriefiltrering minskar spridningen av bakterier till luften i operationssalen
- Stängskyddet minskar risken för att bäraren ska utsättas för kontaminerade vätskor<sup>14</sup>
- Alla BARRIER operationsmunskydd är märkta med tydliga symboler för att förenkla för användaren

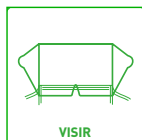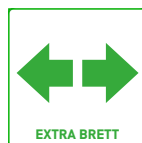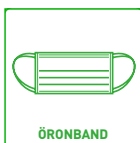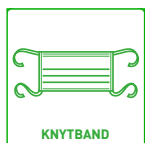



## Påtagningsguide: Munskydd med öronband

- A. Trä in fingrarna i öronbanden. Näsklämman ska sitta högst upp. Placera munskyddet över näsa och mun.
- B. Sätt öronbanden runt öronen. Dra ut munskyddet uppifrån och ned så att alla veck slätas ut. På så sätt täcks så mycket som möjligt av ansiktet och du behöver andas genom så få lager som möjligt.
- C. Forma näsklämman över näsroten för att minimera luftläckage.
- D. Öron och hår ska täckas med lämplig mössa för att minimera spridning av hår och partiklar. Om det finns risk för vätskestänk ska du välja ett stänksäkert munskydd med 4 lager. Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer.
- E. Kassera munskyddet efter användning.





## Påtagningsguide: Munskydd med knytband

- A. Forma näsklämman. Sätt på munskyddet. Se till att det täcker näsa och mun.
- B. Lägg de övre knytbanden på hjässan och dra åt ordentligt så att luftläckaget minimeras.
- C. Placera de nedre knytbanden i nacken och dra åt.
- D. Veckla alltid ut munskyddet helt så att du behöver andas genom så få lager som möjligt.
- E. Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer.
- F. Om det finns risk för vätskestänk, använd ett stänksäkert munskydd och skyddsglasögon eller ett stänksäkert munskydd med visir.
- G. Kassera munskyddet efter användning.



## Påtagningsguide: Munskydd med visir

*Om det finns risk för vätskestänk se till att välja antingen ett stänksäkert munskydd med 4-lager och visir eller ett stänksäkert munskydd med 4-lager som du använder tillsammans med skyddsglasögon.*

- A. Innan du sätter på munskyddet, vik i förväg visiret vid kanterna för att få optimalt skydd mot stänk från sidan som kan komma i kontakt med ögonen.
- B. Förforma näsklämman.
- C. Dra ut munskyddet uppfifrån och ned så att alla veck slätas ut.
- D. Sätt på munskyddet. Se till att det täcker näsa och mun.
- E. Lägg de övre knytbanden på hjässan och dra åt ordentligt så luftläckaget minimeras.
- F. Placera de nedre knytbanden i nacken och dra åt.
- G. Veckla alltid ut munskyddet helt så att du behöver andas genom så få lager som möjligt.
- H. Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer.
- I. Kassera munskyddet efter användning.